

# SOUNDGATE

## KRATKE UPUTE

Kontrola razine jačine zvuka i promjene programa

Telefon

Muzička/audio tipka

Bluetooth® tipku

Indikator baterije



Ove upute su samo kratak vodič.

### **Važno:**

- SoundGate ima punjivu bateriju koju treba napuniti prije uporabe.
- Uvijek koristite SoundGate s okovratnom trakom (antenom) dok koristite mobitel ili prenosite zvuk.

Za više detalja pogledajte SoundGate Upute za uporabu ili posjetite [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

## Spajanje s Bluetooth® uređajima

Prije korištenja SoundGate-a s Bluetooth® mobitelom ili audio izvorom, SoundGate mora biti spojen (uparen) s uređajem. Jednom uparen, bit će uvijek prepoznat od strane SoundGate-a kad god se nađe u njegovom dometu, ako je pri tom SoundGate Bluetooth® funkcija uključena (ON).

### **Priprema Bluetooth® uređaja**

Pogledajte upute telefona ili audio uređaja i pripremite uređaj za Bluetooth® kao što je preporučeno.

### **Stavljanje SoundGate uređaja u režim uparivanja**

Kako biste pokrenuli uparivanje, pritisnite i držite **SoundGate** tipku 7 sekundi sve dok plavo svjetlo ne počne brzo treptati. **Režim uparivanja je aktivan 120 sekundi.**

### **Aktiviranje uparivanja Bluetooth® uređaja**

Pokrenite proces uparivanja na uređaju. Kada uspijete, riječ **"SoundGate 1.4"** će se pojaviti na ekranu uređaja.

### **Unošenje pin koda**

SoundGate kod je 0000. Unošenjem koda SoundGate će se upariti s uređajem. (Uređaj može zahtijevati da ručno aktivirate povezivanje biranjem opcije "Spoji" na ekranu menija.)

## Slušanje muzike/zvuka

Audio izvori se mogu povezati sa SoundGate uređajem:

- > pomoću kabela na audio ulaz
- > pomoću bežične Bluetooth® veze

### **Povezivanje kabelom na audio ulaz**

Koristite audio kabel i širi kraj spojite s audio izvorom (muzički player, itd.) a uži kraj uključite u utičnicu na dnu SoundGate uređaja.

### **Spajanje s Bluetooth® audio izvorom**

Spojite željeni uređaj sa SoundGate uređajem.

#### **Slušanje muzike preko Bluetooth® uređaja**

Pritisnite Bluetooth® tipku na 2 sekunde. Zatim uključite audio izvor.



## Muzička/audio tipka

Tabela prikazuje kako ćete koristiti SoundGate za sve tipove prijenosa audio podataka.

<b>Slušanje muzike ili zvuka</b>	Pritisnite SoundGate muzičku/audio tipku za pokretanje. Na dolazne telefonske pozive možete odgovoriti kratkim stiskom na telefonsku tipku.	
<b>Prekid muzike/zvuka</b>	Ponovno pritisnite muzičku/audio tipku.	
	<p>U slučaju da nećete koristiti SoundGate na nekoliko sati, isključite Bluetooth® (pritisnite 2 sekunde).</p> <p>To sprječava istjecanje SoundGate baterije. Nadopunite SoundGate kada ga ne koristite. (Desno: slika Bluetooth® tipke, plava)</p>	

## Korištenje s mobitelom

<b>Javljanje na dolazne telefonske pozive</b>	SoundGate Bluetooth® funkcija mora biti uključena. Kada telefon zazvoni, pritisnite telefonsku tipku na SoundGate uređaju kako biste se javili.	
<b>Razgovaranje</b>	Pričajte u SoundGate mikrofonski (optimalna udaljenost je 30 cm).	
<b>Prekidanje veze</b>	Pritisnite ponovno SoundGate telefonsku tipku za prekid razgovora.	
<b>Nazovite</b>	Nazovite sa svog mobitela kao što to inače činite. Pričajte u SoundGate mikrofonski – Ne pritišćite SoundGate telefonsku tipku.	
<b>Podešavanje razine jačine zvuka</b>	Pritisnite volume/program tipku na gore ili na dolje dok zvuk ne postane zadovoljavajući.	
<b>Uključivanje i isključivanje mikrofona slušnog pomagala (ON/OFF)</b>	Pritisnite volume/program tipku na gore ili na dolje na 2 sekunde.	

U slučaju da nećete koristiti SoundGate na nekoliko sati, isključite Bluetooth® (pritisnite 2 sekunde).



To sprječava istjecanje SoundGate baterije. Nadopunite SoundGate kada ga ne koristite. (Desno: slika Bluetooth® tipke, plava)

### **Savjeti za ponovno spajanje**

Upareni Bluetooth® uređaji se sami pronalaze kada su uključeni. Ako se uređaji ne povežu automatski, moraju se povezati ručno. Uvijek uključite Vaš mobitel prije nego uključite Bluetooth® funkciju na SoundGate uređaju.

### **Rješavanje problema kada je uređaj van dometa Bluetooth®**

Ako je SoundGate uređaj van Bluetooth® dometa mobitela, veza će se prekinuti. Vraćanje uređaja u domet će ih ponovno povezati.

## Korištenje SoundGate uređaja kao daljinskog upravljača

### **Podešavanje razine jačine zvuka**

Podesite razinu jačine zvuka slušnog pomagala kratkim pritiskom.



### **Promjena programa**

Pritisnite i držite na 2 sekunde kako biste išli naprijed ili nazad u programskom ciklusu.

**Napomena:** To je jedino moguće ako je slušno pomagalo konfigurirano za više programa.



Tijekom prijenosa audio podataka nije moguće prebacivanje na drugi program.

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing • Our passion

05.11/BAG/113371/HR/subject to change